

RP Digital

Für das erste Eingliedern, Einzelpassung prüfen



Oberkieferschiene

Unterkieferschiene

Eingliedern



Beide Schienen zusammen Einsetzen,
vorsichtig zusammenbeißen



Scannen Sie den QR-Code um das Video zu sehen

RP Digital Eingliederung
<https://youtu.be/OaFdbJTmV-E>

Unterkiefer ausgliedern



An den „Flügel“ der unteren Schiene greifen, mit leichtem Druck nach oben halten. Unterkiefer nach unten bewegen.

Oberkiefer ausgliedern



An den „Flügel“ der oberen Schiene greifen, mit ausreichendem Druck die Schiene nach unten ziehen.